



Informatie nieuwe testkits

Het federaal platform werk al sinds mei met een geïnactiveerd transportmedium (Zymo) (zie foto 1). Dit medium zal verder gebruikt worden. De tubes waarin het medium zit kunnen variëren naargelang het aanbod op de markt. Vanaf begin november zullen effectief **nieuwe tubes** in omloop komen van de firma Diagenode (zie foto 2). Het specifieke met deze tubes is dat een dop slechts één keer gebruikt kan worden. Als u de dop van de tube afdraait, dient u deze weg te gooien; na staalafname moet u de nieuwe meegeleverde dop op de tube draaien en deze zoals steeds zeer goed vastdraaien (zie handleidingen in annex).

We lijsten hieronder de belangrijkste verschillen tussen de huidige en de nieuwe tubes op:

| | Huidige tubes | Nieuwe tubes |
|------------------------|--|---|
| <i>Foto</i> | Foto 1:  | Foto 2:  |
| <i>Leverancier</i> | Greiner | Diagenode |
| <i>Labels</i> | Geel label met informatie over het product. Barcode (CV-code) op apart wit label. | Wit label met informatie over het product en barcode (CV-code). |
| <i>Formaat barcode</i> | CV-xxxxxxxC waarbij x een cijfer (0-9) is en C het controlecijfer. | CV-xxxxxxxC waarbij x een cijfer (0-9) is en C het controlecijfer. Opmerking: als onderdeel van de transitie zullen er in het begin nieuwe tubes met de huidige barcode verdeeld worden. OF CVxxxxxxCC waarbij x een cijfer (0-9) is en CC het controlecijfer. Opmerking: na staalafname kan de barcode (het afscheurgedeelte) van het label verwijderd worden en bijgehouden worden voor referentie naar het |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| | | testresultaat (indien gewenst). (Zie instructiefiche in annex) |
| <i>Procedure</i> | Huidige procedure. | De procedure voor staalafname blijft dezelfde, echter na staalafname dient de oorspronkelijke dop (oranje kleur) vervangen te worden door de secundaire dop (groene kleur) die meegeven wordt in de testkit. Het is belangrijk deze dop goed vast te draaien. Gelieve de instructiefiche te consulteren. (Zie instructiefiche in annex) |