



**COVID-19 ANTIGEN**  
**SNELTESTEN**  
**BIOSYNEX**

**Handleiding voor afname**




## VOORBEREIDING


- Voor gebruik moeten alle materialen op **kamertemperatuur** gebracht worden.
- **Check de inhoud van elke doos:** 25 testen, 25 wissers, een zakje met 25 tubes en 25 dopjes, 2 flesjes met buffervloeistof, een karton rekje om de tubes in te zetten en een handleiding (NL op p. 5-6).
- **Verder nodig:** timer(s), afvalcontainer voor mogelijk besmet materiaal, beschermingsmateriaal.
- Zorg voor een **proper ontsmet werkvlak**.
- Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht bij staalafnames op vlak van **persoonlijk beschermingsmateriaal en handhygiëne**.
- Als u **meerdere personen tegelijk** test, zorg dan voor labels of markeringen om de tubes en testen te identificeren.
- Open de materialen pas op het moment van gebruik.

## PROCEDURE


1. Zet het karton rekje in elkaar en zorg dat het stevig vaststaat.
2. Zet een tube in het karton rekje en doe 10 druppels van de buffer in de tube.

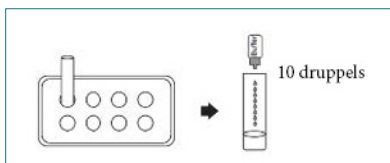


3. Gebruik de meegeleverde wisser voor nasopharyngeale afname (via de neus): plaats de wisser voorzichtig horizontaal in het neusgat van de patiënt tot je weerstand voelt en de wisser tegen de nasopharynx komt. Strijk langs het oppervlak van het achterste deel van de nasopharynx en draai de wisser enkele malen rond om zeker te zijn dat de wisser voldoende materiaal opneemt. Verwijder de wisser langzaam uit de neusholte.

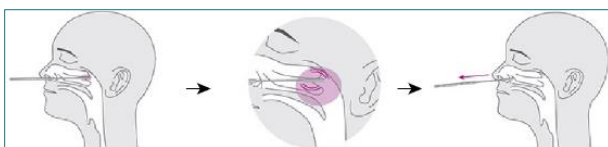

4. Steek de wisser in de tube met buffervloeistof, zodat de tip goed in de vloeistof zit. Draai de wisser tenminste 6 keer rond en druk daarbij de kop tegen de onder- en zijkant van de tube. Laat de wisser 1 minuut in de tube met vloeistof staan. Druk de tube een aantal keer samen om het monster zo volledig mogelijk uit de wisser te halen. Haal de wisser er uit, terwijl je de tip tegen de wand van de tube duwt en ronddraait, om er zoveel mogelijk vocht uit te duwen.

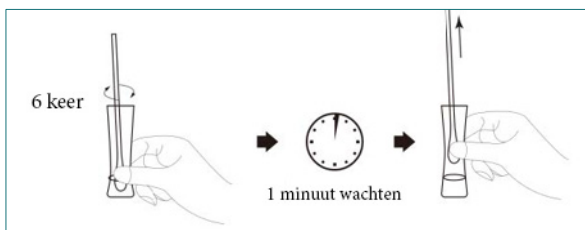

5. Zet een dopje op de tube. Zorg dat het goed vast zit.
6. Haal de test uit de verpakking. Plaats op een vlakke ondergrond.
7. Doe 4 druppels van de vloeistof uit de tube in het ronde gaatje (S) van de test door zachtjes op de tube te knijpen.

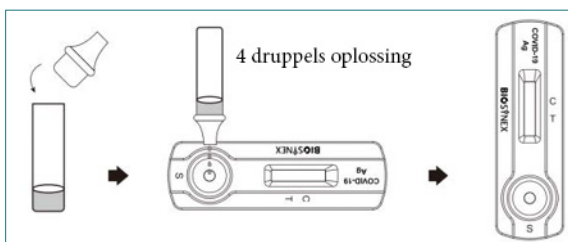

8. Laat de test 15 minuten staan.
9. Lees het resultaat af na 15 minuten.

**OPGELET:** te vroeg of te laat aflezen kan een fout resultaat geven!

- Als er 2 streepjes te zien zijn (zowel ter hoogte van 'C' als 'T') is de test **positief**
- Als er enkel 1 streepje bij 'C' te zien is is de test **negatief** (dit is de controle)
- Als er enkel 1 streepje te zien is bij 'T' of helemaal geen streepje bij 'C' is de test **niet correct uitgevoerd** en moet deze herdaan worden

## AANDACHTSPUNT

Na het uitvoeren van de test alle mogelijk besmette materialen als zodanig behandelen: zowel de wissers, tubes met oplossing als testen zelf in gele containers.